

# דף מידע

## משאבת חלב חשמלית דו צדדית

### אמדה פינס FINESSE

**שקטה יותר | חזקה יותר | טובה יותר - משאבת החלב החדשה מבית אמדה**

מחקה בצורת הגל שלה את משאבת Ameda Platinum שנמצאת בשימוש יומי בבתי החולים. הטכנולוגיה מזעזערת והותאמה למשאבה אישית, קלת משקל, בעיצוב קומפקטי ובהתאמה לשימוש יומי. אידיאלית לאמהות החוזרות לעבודה ולאמהות המחפשות פיתרון לשיאבה נוחה ויעילה

**למשאבת Ameda Finesse שנה אחרית!**  
**באישור מכון "צומח" ניתנת לעבודה עם שעון שבת!**



- Comfortflow™ - טכנולוגיית שאיבה חלקה יותר ועקבית יותר שמשמעותה יותר חלב.
- טכנולוגיה שקטה DB 41 (דציבל)
- HygieniKit® Milk Collection System - מנגנון ה-AIRLOCK המחסום היחיד המאושר ע"י ה-FDA שנועד להגן על המשאבה, הצינורות והבקבוקים מפני עובש וחיידקים.
- מכוונים נפרדים לשליטה על מהירות ועוצמת השאיבה, עם 32 תכניות שאיבה.
- אפשרות לשיאבה חד צדדית/ דו צדדית.
- קלה לניקוי.
- הפעלה באמצעות חשמל (שנאי כלול) / 6 סוללות (לא כלול) / שנאי לרכב (לא כלול).

#### הוראות שימוש:


1. לפני הפעלת המשאבה הצמידי את הקונסול/ים לחזה, יש להדק על מנת ליצור אטימה.
2. הפעלת המשאבה - יש לחבר את המשאבה למקור מתח ולסובב את כפתור SUCTION לימין עד שנדלקת נורת ירוקה.
3. כיוון המשאבה - סיבוב מכוון SUCTION ימינה (עם כיוון השעון) יגביר את עוצמת השאיבה. סיבוב שמאלה (הפוך לכיוון השעון) יפחית את עוצמת השאיבה.
4. סיבוב מכוון SPEED ימינה, יעלה את מהירות השאיבה. סיבוב שמאלה, יוריד את מהירות השאיבה.

#### הוראות ניקוי:


- יש לרוחץ את הידיים היטב במים וסבון
- לפני שימוש ראשוני ולאחר כל שימוש במשאבה יש לשטוף במים וסבון ולבצע סטריליזציה (הרתחה של 20 דקות) לחלקים: בקבוקים, קונסול, שסתומים ודיאפרגמות
- אין להשתמש בחומרים ממסים או בחומרים הגורמים לגירוי
- במידה ואת מעוניינת לשאוב בצד אחד בכל פעם, יש לנתק את אחד הצינורות מהמחבר/מפצל ולסגור את הפקק

- קומפקטיות ובעלת עיצוב ארגונומי
- קלה לניקוי ולשייאה
- זווית אחיזה מתכוננת מאפשרת חופשיות ודינמיות בתפעול פעולת השאיבה
- שאיבה נוחה במקביל לשד, ללא צורך בכיפוף היד או דאגה ליצירת אטימה בין המשאבה לחזה
- אידיאלית לאמהות החוזרות לעבודה ולאמהות המחפשות פיתרון לשאיבה נוחה ויעילה
- למשאבת אמדה MANUAL שנה אחריות!


### הוראות שימוש:

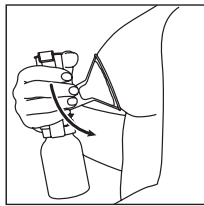


1. אחזי בידיית כשהאגודל נמצא לפני התא העליון של הקונוס והאצבעות נמצאות מאחוריו.

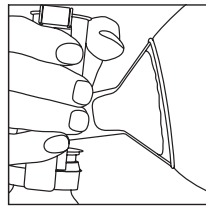


2. סובבי את הידיית כדי להתאימה לנוחות שורש כף היד. שורש כף היד צריך להיות ישר.

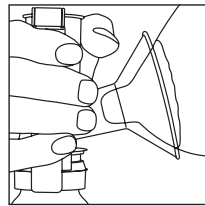

3. הצמידי את הקונוס לשד, כדי ליצור אטימה לאוויר.

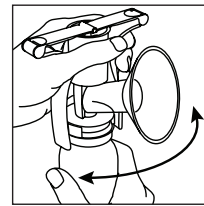

4. מקמי את הפטמה במרכז הקונוס.

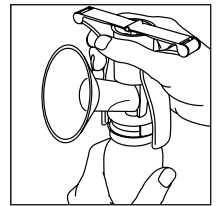

5. לחצי במשך דקות אחדות לחיצות מהירות וקלות על השד, כדי לעורר את שחרור החלב.

6. כשהחלב זורם, לחצי לחיצות איטיות וחזקות, אך עם זאת נוחות, החזיקי את התנועה ושחררי אותה כדי לשאוב חלב. עצה: תוכלי לרכון קדימה או להטות מעט את הקונוס כלפי מטה, תוך שמירה על האטימה שלו, כדי לעזור לחלב לזרום לתוך הבקבוק.
7. כשזרם החלב נעשה איטי, חזרי על שלבים 5 ו-6.
8. שחררי את האטימה כדי להסיר את קונוס השד מהשד.
9. חזרי על שלבים 1 עד 8 על השד השני לפי הצורך.
10. עצה: שאבי 15-10 דקות מכל שד.

### הוראות ניקוי:

- יש לרחוץ את הידיים היטב במים וסבון לפני שימוש ראשוני ולאחר כל שימוש במשאבה יש לשטוף במים וסבון ולבצע סטריליזציה (הרתחה של 20 דקות) לחלקים: בקבוקים, קונוסים, שסתומים ודיאפרגמות
- אין להשתמש בחומרים ממסים או בחומרים הגורמים לגירוי



### עצות לשאיבה:

#### התאמת קונוס השד

1. התאמה טובה - הפטמה מתנועעת בחופשיות.
2. קטן מדי - הפטמה מתחככת.
3. גדול מדי - העטרה נשאבת פנימה.

ניתן לרכוש בנפרד קונוס שד במידות נוספות.